

**Carga máxima: una persona****Colocación y ajuste**

Desate todas las correas.

Tumbe al herido en la camilla y asíéntele firmemente contra el soporte en la base de la camilla. Pase las correas de las piernas entre las piernas y átelas sobre la cadera. Ate las cintas del pecho sobre el pecho del herido, por encima o por debajo de los brazos en función de la gravedad y consciencia del herido. Ajuste las cintas ceñidas pero sin estrangular. Si es necesario, ate las correas de la cabeza alrededor de la cabeza.

Cuando se comience a elevar la camilla y el peso del herido se asiente sobre el soporte en la base de la camilla, compruebe y reajuste si es necesario la tensión de las correas para que sean seguras.

Uso

Transporte la camilla utilizando cualquiera de las asideras a lo largo de la camilla y en las esquinas.

La camilla no aporta inmovilización total de la columna vertebral. Use entablillado adicional por separado si se sospecha que pueda haber lesiones en la columna o en las extremidades inferiores. La camilla Telson no aporta apoyo a la parte superior de la pierna. Esto podría agravar lesiones ya existentes en las piernas y debe tenerse en consideración como aliviar el problema usando entablillado adicional.

Elevación vertical

Ate todas las cuerdas al marco metálico situado en la parte superior central junto a la cabeza del herido, tal y como se muestra.

Elevación horizontal

Ate las bridas adjuntas a las esquinas de las asideras. Junte las gazas de las cintas mediante un conector para elevar la camilla. Hay dos posiciones diferentes, una para elevación horizontal y otra para elevación ligeramente inclinada.



